

Problemer med Sleep Tight kan oftes løses på en simpel måde. Denne oversigt fremgår også af manualen til Sleep Tight



Fejlfinding Sleep Tight

SYMPTOM	CHECKLISTE	
Bevægelige dele sidder fast		Udskift eventuelt bøsning.
Modulerne kan ikke bevæges af motorerne		Er sengen tilsluttet strøm? Lyser den grønne lampe på kontrolboksen? Er motorstik tilsluttet kontrolboks? Prøv med en anden håndbetjening. Virker sengen fortsat ikke, skal kontrolboksen udskiftes.
Elektriske ledninger er defekte		De skal udskiftes: Ledningerne udskiftes sammen med den el-komponent, de er fastmonteret i.
Håndbetjening er i stykker		Skal udskiftes.
Hjulene er slidte eller skæve		Udskift hjulene i begge sider.
Hjulene kan vanskeligt dreje		Rens drejekransen. Kontroller at der ikke er viklet noget ind i hjulet.
Justering af leje og motorer		Skal ikke justeres.
Løse eller rokkende dele		Spænd bolte og møtrikker.
Motor bevæger sig kun vanskeligt		Stram bolte og møtrikker, så motoren kører lige.
Motor bevæger sig kun nogle gange		Efterse håndbetjening og ledning til motoren. Vrik eventuelt frem og tilbage med ledningen. Hvis fejlen kommer og går, skal håndbetjeningen udskiftes.
Motor bevæger sig slet ikke		Udskift motoren.

Problemer med Sleep Tight kan oftes løses på en simpel måde. Denne oversigt fremgår også af manualen til Sleep Tight



Fejlfinding Sleep Tight

SYMPTOM	CHECKLISTE	
Pedaler eller dupper er faldet af		Bestil nye som reservedele og sæt dem på.
"Knirkelyde" i hængsler		Smøring kan foretages med WD40, som kan købes i de fleste bygge- markeder.
Skrammer i lakken		SKAL udbedres for at undgå rustskader. Spraylak kan rekvireres hos H.C. Equipment.
Stellet eller andre dele er skæve		Kontakt H.C. Equipment for reparation. Reparation kan ikke foretages på stedet.
Stikkene kan ikke trykkes helt ind i kontrolboksen		Fugt tætningsringen omkring stikket med en smule vand og prøv igen.