

Problemer med VENDLET kan oftes løses på en simpel måde. Denne oversigt fremgår også af manualen til VENDLET.



Fejlfinding VENDLET V4

SYMPTOM	CHECKLISTE
VENDLET virker ikke	Er strømforsyningen tændt?
	Er stopknappen trykket ned (= strømforsyningen er slukket)?
	Er den grønne indikator tændt (dvs. er timeren aktiveret)?
	Er alle ledningerne monteret korrekt i elektronikboksen og vender stikkene rigtigt?
	Er ledningen fra transformatoren koblet til 230 V?
	Skal sikringerne i transformatoren eller elektronikboksen udskiftes?
	Udskift håndbetjeningen. Hvis fejlen er rettet, skal den oprindelige håndbetjening repareres.
En af rullerne virker ikke	Er ledningen fra rullen monteret korrekt?
	Kontroller stikket på ledningen for synlige fejl.
	Er ledningen defekt eller beskadiget?
	Udskift håndbetjeningen. Hvis fejlen er rettet, skal den oprindelige håndbetjening repareres.
En af rullerne drejer for langsomt	Kontroller og juster placeringen af beslag.
	Eventuel reparation af elektronik eller motor.
	Prøv at bytte om på stikkene til motorrullerne. Hvis den anden rulle nu drejer for langsomt, skal elektronikboksen til reparation. Hvis den samme rulle stadig drejer for langsomt, skal motoren skiftes.



Fejlfinding VENDLET V4

SYMPTOM	CHECKLISTE
En rulle kan kun dreje den ene vej	Elektronikboksen skal evt. repareres.
	Udskift håndbetjeningen. Hvis fejlen er rettet, skal den oprindelige håndbetjening repareres.
VENDLET virker ikke som den skal	Er strømforsyningen tilstrækkelig?
	Har forlængerledningen det nødvendige kvadrat (1.0 mm ²)?
Knapperne på håndbetjeningen virker ikke korrekt	Er ledningerne fra motorrullerne monteret korrekt i elektronikboksen?
	Kører vendelagnet over motorrullen?
Timer virker ikke	Er stopknappen trykket ned? Drej for at udløse.
	Starter timeren ikke, når der trykkes på den grønne startknap (grøn lampe tænder), kan sikringerne i transformatoren eller elektronikboksen være sprunget.
	Hvis timeren stadig ikke starter, skal elektronikboksen til reparation.
Aktuatorerne vil ikke køre	Løsn boltene, som holder beslagene fast på sengerammen, løft rullen op og ned et par gange, så beslagene finder deres naturlige plads. Prøv at aktivere aktuatorerne. Husk at spænde boltene igen.
	Der kan være støv eller andet, som hindrer glidefunktionen. Rens glidelejer og sprøjt med lidt siliconespray.