

HC-2



FØR BRUG AF VENDLET HC-2


1. Motorrullerne skal være hævet og liggefladen vandret inden betjening af VENDLET. Juster evt. sengens højde for at sikre korrekt arbejdsstilling, når sengehestene fjernes.
2. Fjern sengehestene og hæng dem på mellemstangen under motorrullerne.
3. Drej den røde stopknap på elektronikboksen for at tænde for strømmen til VENDLET.
4. Tryk på den grønne startknap for at aktivere timeren. Timeren kører i 1½ minut.
5. VENDLET er nu klar til brug. Tryk evt. på den grønne startknap for at aktivere timeren i yderligere 1½ minut.
6. Fjern sikkerhedslåsene fra beslagene for at sænke motorrullerne.

EFTER BRUG AF VENDLET HC-2

1. Hæv motorrullerne.
2. Slæk træklaget på begge motorruller og juster sengens højde. Pres derefter sengehestene ned over rullerne.
3. Tryk på stopknappen for at afbryde strømmen.
4. Sæt sikkerhedslåsene i beslagene.



Ved betjening af motorrullerne er det vigtigt at anvende korrekt løfteteknik.

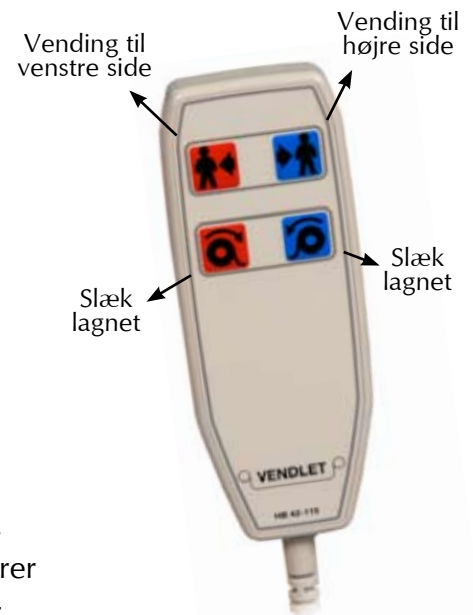

SIKKERHEDSLÅSE

Sikkerhedslåse i beslagene låser motorrullerne i hævet position. Dette forhindrer brugeren i at skubbe eller sparke beslagene ud af lås, så rullerne klapper ned.



VENDLET skal monteres og anvendes som beskrevet i brugermanualen.



Tryk altid på stopknappen for at afbryde strømmen efter brug af VENDLET.



Al opmærksomhed skal rettes mod brugeren under anvendelsen af VENDLET.

HC-2





MONTERING AF GLIDELAGEN

Glidelagnet på madrassen nedsætter friktionen og dermed strømforbruget ved brug af VENDLET.



1. Før elastik fra hjørnerne af glidelagnet omkring madrassen.
2. Saml velcro bænderne omkring stålrammen under madrassen.

MONTERING AF TRÆKLAGEN

1. Placer træklaget midt på sengen med velcrobåndet nedad.
2. Tryk lagnet fast på velcrostrimlen på motorrullerne i samme afstand fra enden på begge sider af sengen. Lagnet skal altid køre OVER rullerne. Hvis lagnet kører under rullen, nedsættes trækraften. Træk ikke i lagnet, da det passer nøjagtigt til rullerne.
3. Drej stopknappen og tryk på den grønne startknop for at aktivere timeren (timeren kører nu i 1½ minut).
4. Stram lagnet omkring rullerne ved tryk på  og  , indtil det hæver sig over madrassen.
5. Løsn lagnet igen, indtil det ligger glat på madrassen med den røde stribe midt på sengen.


SENGEHESTE

Sengeheste fastgøres mellem madrassen og mellemstangen på inder-siden af motorrullerne. Der benyttes 2 sengeheste på hver motorrulle:

1. Tryk  og  for at slække træklaget så meget i begge sider, at sengehestene kan presses ned over motorrullerne.
2. Juster sengens højde for at sikre korrekt arbejdshøjde. Når sengehestene presses ned over motorrullerne, skal afstandstappen flugte med hoved- eller fodgærdet. NB! Husk altid at sengehesten skal monteres i fodenden før i hovedenden.
3. Når sengehestene ikke er i brug, bør de altid opbevares på mellemstangen under motorrullerne.



Det er lettest at presse sengehestene skævt på rullerne, en bøjle ad gangen.

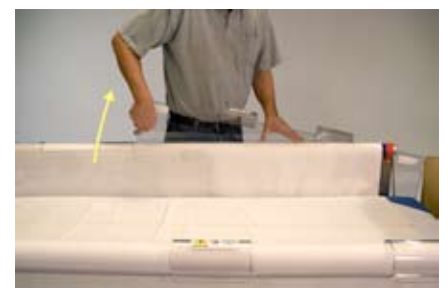

Fjern sengehestene ved at tage fat i siden og hive skråt opad.