



# VENDLET

det elektriske vendelagen

*Plejeren trykker blot på en knap for at flytte eller vende brugeren i sengen.*



## Nem og blid håndtering af sengeliggende uden arbejdsskader

### Skåner personalet for fysisk belastning og tunge løft

VENDLET fjerner behovet for manuel forflytning i sengen og er derfor et uundværligt værktøj til sikring af et sundt arbejdsmiljø.

### Let at montere på de fleste plejesenge

Efter montering fungerer VENDLET som en integreret del af sengen. VENDLET kan også bruges med vekseltrykmadrasser og til inkontinente brugere.

### Giver plejeren frihed og overblik til at fokusere på brugernes behov

Den ensartede og rolige vending er behagelig for brugeren, idet lagnet understøtter kroppen i hele længden. Plejeren bevarer overblikket og kan støtte brugerens arme, ben eller hoved efter behov.

### Sparer tid og ressourcer

VENDLET forenkler tilrettelæggelsen af den daglige pleje, idet plejeren i vidt omfang kan arbejde alene med brugeren.

### Sådan virker VENDLET

Træklagnet er viklet omkring 2 ruller, en på hver side af sengen. Begge ruller er forsynet med en motor.

Ved tryk på håndbetjeningen, strammes lagnet omkring rullen, og brugeren flyttes i sengen eller trækkes om på siden.



Vending og flytning



Pålægning af løftesejl



Påklædning og pleje



*Håndteringen sker med lethed og værdighed. Det giver plads til nærvær i plejen, hvilket øger personalets arbejdsglæde og brugerens trivsel.*

*VENDLET skåner brugeren for smerte fra 'spidse fingre' og pludselige ryk. Lagnet følger kroppen under hele vendingen og mindsker dermed risikoen for udvikling af decubitus.*

*Skal brugeren sengevaskes, kan plejeren optimere arbejdsstillingen ved at sænke rullerne, trække brugeren tæt mod sengekanten og justere sengens højde.*

## VENDLET modeller

	VENDLET V4	VENDLET HC-2
Max. brugervægt	200 kg (400 kg*)	200 kg
Vendefunktion	Elektrisk	Elektrisk
Hævning og sænkning af ruller	Elektrisk	Manuel
Særlige krav til fri plads langs sengens sider når rullerne betjenes	Ingen	Min. 1 m
Brug af sikkerhedslåse	Ingen	Manuel
Brug af sengeheste	Manuel	Manuel



*Den indbyggede timer afbryder strømmen til rullerne efter 1½ minut.*

\* VENDLET V4 kan specialbygges til brugere, der vejer op til 400 kg.

## Teknisk data

Strømforsyning	Transformator
Mærkeeffekt	100 VA
Mærkespænding	Primær 230 Volt AC/50HZ Sekundær 27 Volt DC
Overensstemmelse	EU direktiv 93/42/EEC for medicinsk udstyr

Alle rettigheder forbeholdes.  
Copyright 2008 H.C. Equipment ApS



*VENDLET fastgøres til sengerammen og påvirker ikke sengens øvrige funktioner.*

